

ПРОМИВНИЙ РОЗЧИН ACCENT

ACCENT WASHING SOLUTION

Кат. №: 3-119

Дата випуску інструкції: 11-2024



Основою при проведенні аналізу є оригінал інструкції англійською мовою, вкладеної в набір. Номер і дата версії оригіналу та перекладу інструкції повинні співпадати.

Назва реагенту	Варіант	Кат. №
ПРОМИВНИЙ РОЗЧИН ACCENT	4 x 40 мл (ml)	3-119

ПРИЗНАЧЕННЯ

ПРОМИВНИЙ РОЗЧИН ACCENT призначений для очищення зондів для реагентів і зразків автоматичних аналізаторів під час рутинної роботи аналізатора, а також для усунення ефекту перенесення. Призначений тільки для діагностики *in vitro*, для користування медичними працівниками.

ПРИНЦИП РОБОТИ

ПРОМИВНИЙ РОЗЧИН ACCENT являє собою промивний розчин, розміщений на борту аналізатора. Видалення залишків біологічного матеріалу та реагентів, зокрема білковісних матеріалів та мікробних відкладень із зондів для реагентів та зразків, відбувається завдяки очисним властивостям промивного розчину, який містить поверхнево-активні речовини та гідроксид натрію. який розчиняє і видаляє органічні часточки.

КОНЦЕНТРАЦІЯ АКТИВНИХ ІНГРЕДІЄНТІВ В РЕАГЕНТІ

Тезіт	1.25%
цитратний буфер	0.2 моль/л (mol/l)
натрію гідроксид	0.7 моль/л (mol/l)
ПАР	

СТАБІЛЬНІСТЬ РЕАГЕНТУ

Реагент необхідно використати до закінчення терміну придатності, зазначеного на етикетці.

Реагент, що зберігається на борту аналізатора при 2-10 °C (°C), стабільний протягом 30 днів.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ТА ПРИМІТКИ

- Захищати від прямого сонячного світла!
- Не використовуйте реагент після закінчення терміну придатності, зазначеного на етикетці.
- Не змішуйте реагент, що залишився, з реагентом з нової упаковки.
- Використовуйте засоби індивідуального захисту, щоб запобігти контакту зі зразками, реагентами, калібраторами та контролями.
- Уникайте скидання в каналізацію або в навколишнє середовище.
- Будь ласка, зверніться до Сертифікату безпеки матеріалу для отримання детальної інформації щодо безпечного зберігання та використання продукту.
- Продукт відповідає критеріям класифікації відповідно до Регламенту (ЄС) № 1272/2008.

Інгредієнти:

ПРОМИВНИЙ РОЗЧИН ACCENT містить гідроксид натрію.

Небезпека



H314 Викликає сильні опіки шкіри та пошкодження очей.
H290 Може викликати корозію металів.
P280 Одягайте захисні рукавички, захисний одяг, засоби захисту очей або обличчя.

P305+P351+P338 ПРИ ПОТРАПЛЯННІ В ОЧІ: Обережно промийте водою кілька хвилин. Зніміть контактні лінзи, якщо вони є і це легко зробити. Продовжуйте промивати.

P310 негайно зателефонуйте в ТОКСИКОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР або до лікаря.

P234 Зберігати тільки в оригінальній упаковці.

ПРИСТРОЇ, ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В ПОЄДНАННІ З РЕАГЕНТОМ

ПРОМИВНИЙ РОЗЧИН ACCENT призначений для очищення зондів для реагентів і зразків автоматичних аналізаторів:

*ACCENT-200 (II GEN) / BS-200

*ACCENT S120 / BS-230

*ACCENT MC240 / BS-240Pro

*ACCENT M320 / BS-360E

*ACCENT 400 / BS-450

ПРОЦЕДУРА АНАЛІЗУ

ПРОМИВНИЙ РОЗЧИН ACCENT готовий до використання.

Використовуйте відповідно до інструкції з експлуатації аналізатора та вказівок, що містяться в інструкції:

- 51_03_24_001_ACCENT-200_CARRYOVER
- 51_03_24_005_ACCENT-S120_CARRYOVER
- 51_03_24_006_ACCENT MC240_M320_CARRYOVER
- 51_03_24_013_ACCENT_400_CARRYOVER.

УТИЛІЗАЦІЯ ВІДХОДІВ

З відходами слід поводитися як з потенційно небезпечними та інфекційними матеріалами. Утилізувати відходи необхідно відповідно до прийнятих лабораторних інструкцій і процедур. Усі матеріали повинні бути утилізовані безпечним і прийнятним способом відповідно до чинних місцевих законодавчих вимог.

ІНЦИДЕНТИ¹

Про будь-який серйозний інцидент, який стався у зв'язку з пристроєм, слід повідомити виробника (веб-адреса: incidents@cormay.pl) та компетентний орган держави, в якій перебуває користувач та/або пацієнт.

Серйозний інцидент означає будь-який інцидент, який прямо чи опосередковано призвів, міг призвести або може призвести до будь-чого з наступного:

- смерть пацієнта, користувача або іншої особи,
- тимчасове або постійне серйозне погіршення стану здоров'я пацієнта, користувача або іншої особи,
- серйозна загроза здоров'ю населення.

ЛІТЕРАТУРА

1. Regulation (EU) 2017/746 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2017 on in vitro diagnostic medical devices.

СПИСОК ЗМІН

Попередня версія: 05	Поточна версія: 06
Оновлено розділи: ПРИЗНАЧЕННЯ, ЗАСТЕРЕЖЕННЯ І ПРИМІТКИ, ПРОЦЕДУРА, УТИЛІЗАЦІЯ ВІДХОДІВ, ЛІТЕРАТУРА. Додано розділи: ПРИСТРОЇ, ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В ПОЄДНАННІ З РЕАГЕНТОМ	

ПОЯСНЕННЯ СИМВОЛІВ

CE	СЕ-маркування
IVD	Медичний прилад для <i>in vitro</i> діагностики
Factory	Виробник
LOT	Номер партії
Hourglass	Використовувати до
REF	Номер за каталогом
Thermometer	Обмеження температури
Book	Зверніться до інструкції із застосування
Sun	Зберігати подалі від сонячних променів



ВИРОБНИК

PZ CORMAY S.A.
Wiosenna 22,
05-092 Lomianki, Poland
phone: +48 (0) 81 749 44 00
fax: +48 (0) 81 749 44 34
<http://www.cormay.pl>

ПЗ КОРМЕЙ С.А.
вул. Віосенна, 22
05-092, м. Ломянкі, Польща
тел.: +48 (0) 81 749 44 00
факс: +48 (0) 81 749 44 34
<http://www.cormay.pl>



УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ

ТОВ «Діамеб трейд»
вул. Симона Петлюри, буд. 25
м. Івано-Франківськ, 76014, Україна
тел.: +380 (342) 77 51 22
e-mail: info@diameb.ua
www.diameb.ua

