

ЛІПОКАЛІН, АСОЦІЙОВАНИЙ З ЖЕЛАТИНАЗОЮ НЕЙТРОФІЛІВ, КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ

Neutrophil Gelatinase-Associated Lipocalin (NGAL) Quality Control

Кат. №: 52081008

Дата випуску інструкції: 30-09-2024
Версія: A/0



Основою при проведенні аналізу є оригінал інструкції англійською мовою, вкладеної в набір. Номер і дата версії оригіналу та перекладу інструкції повинні співпадати.

НАЗВА ПРОДУКТУ

Загальна назва: Ліпокалін, асоційований з желатиназою нейтрофілів, Контроль якості.
Торгова назва: NGAL КЯ.

СКЛАД НАБОРУ

Специфікація: 2 x 0.2 мл (mL) x флакон Кат. №: 52081008

ПРИЗНАЧЕННЯ

Для контролю якості NGAL на флуоресцентних імунохроматографічних аналізаторах.

ОСНОВНІ КОМПОНЕНТИ

Рекомбінантний білок Ліпокаліну, асоційований з желатиназою нейтрофілів

ЗБЕРІГАННЯ І СТАБІЛЬНІСТЬ

НЕРОЗКРИТИЙ: КЯ стабільний протягом 24 місяців (див. етикетку щодо конкретної дати) при температурі від -25 °C (°C) до 8 °C (°C),
ВІДКРИТИЙ: відновлений КЯ стабільний протягом 6 днів при температурі -20 °C (°C) або 1 день при 2-8 °C (°C) у темному місці.
Примітка: уникати повторного заморожування/розморожування КЯ.

ПРОЦЕДУРА ТЕСТУВАННЯ

- Перед використанням доведіть контроль якості до кімнатної температури (18-30 °C (°C)).
- Обережно відкрийте ковпачок пляшки, щоб уникнути розпилювання вмісту.
- Додайте 0.2 мл (mL) очищеної води.
- Закрийте пляшку ковпачком та залиште її при кімнатній температурі на 15 хвилин, обережно струсіть пляшку, щоб повністю розчинити ліофілізат.
- Після повного розчинення ліофілізату використати як зразок.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Тільки для діагностики *in vitro*, див. посібник з експлуатації.
- Не використовувати реагенти після закінчення терміну придатності.
- Компоненти різних партій не можуть бути взаємозамінними.

ЦІЛЬОВІ ЗНАЧЕННЯ

Продукти контролю якості вироблені в кожній партії будуть передані в кілька референсних лабораторій і їхня оцінка буде завершена після отримання цими лабораторіями надійних результатів. Для кожної партії встановлюється діапазон контролю якості для кожного параметра і кожного методу контролю параметрів. Діапазон контролю якості дорівнює присвоєному середньому значенню $\pm 3SD$. Це дозволяє отримати надзвичайно достовірні значення, які можуть бути використані лабораторіями для забезпечення достовірності своїх методів.

Аналіт	Одиниця	Діапазон	низький	високий
		Цільове значення		
Ліпокалін, асоційований з желатиназою нейтрофілів	нг / мл (ng/mL)	На основі номеру партії	На основі номеру партії	На основі номеру партії



ВИРОБНИК

Genrui Biotech Inc.
4-10F, Building 3
Geya Technology Park,
Guangming District, 518106
Shenzhen, China
Phone: + 86-755-26835560
Fax: + 86-755-26678789
e-mail: info@genrui-bio.com
Web: www.genrui-bio.com

ГЕНРУЙ БІОТЕК Інк.
4-10Ф, Будівля 3
Технологічний Парк Гея
Район Гуанмін, 518106
Шеньчжень, Китай
Тел.: + 86-755-26835560
Факс: + 86-755-26678789
е-пошта: info@genrui-bio.com
Веб: www.genrui-bio.com



УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ

ТОВ «ДІАМЕБ ТРЕЙД»
вул. Симона Петлюри, буд. 25
м. Івано-Франківськ, 76014, Україна
тел.: +38 (0342) 775 122
е-пошта: info@diameb.ua
www.diameb.ua



2 °C 30 °C