

ЦИСТАТИН С, КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ

Cystatin C Quality Control

Кат. №: 52081011

Дата випуску інструкції: 30-09-2024
Версія: А/0



Основою при проведенні аналізу є оригінал інструкції англійською мовою, вкладеної в набір. Номер і дата версії оригіналу та перекладу інструкції повинні співпадати.

НАЗВА ПРОДУКТУ

Загальна назва: Цистатин С, Контроль якості.
Торгова назва: Cys-C QC.

СКЛАД НАБОРУ

Специфікація: 2 x 0.2 мл (mL) x флакон Кат. №: 52081011

ПРИЗНАЧЕННЯ

Для контролю якості Цистатину С на флуоресцентних імунохроматографічних аналізаторах.

ОСНОВНІ КОМПОНЕНТИ

Рекомбінантний білок Цистатину С.

ЗБЕРІГАННЯ І СТАБІЛЬНІСТЬ

НЕРОЗКРИТИЙ: КЯ стабільний протягом 24 місяців (див. етикетку щодо конкретної дати) при температурі від -25 °C (°C) до 8 °C (°C),
ВІДКРИТИЙ: відновлений КЯ стабільний протягом 6 днів при температурі -20 °C (°C) або 1 день при температурі 2-8 °C (°C) у темному місці.
Примітка: уникати повторного заморожування/розморожування КЯ.

ПРОЦЕДУРА ТЕСТУВАННЯ

1. Перед використанням доведіть контроль якості до кімнатної температури (18-30 °C (°C)).
2. Обережно відкрийте ковпачок пляшки, щоб уникнути розбризкування вмісту.
3. Додайте 0.2 мл (mL) очищеної води.
4. Закрийте пляшку ковпачком та залиште її при кімнатній температурі на 15 хвилин, обережно струсіть пляшку, щоб повністю розчинити ліофілізат.
5. Після повного розчинення ліофілізату використати як зразок.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- 1) Тільки для діагностики *in vitro*, див. посібник з експлуатації.
- 2) Не використовувати реагенти після закінчення терміну придатності.
- 3) Компоненти різних партій не можуть бути взаємозамінними.

ЦІЛЬОВІ ЗНАЧЕННЯ

Продукти контролю якості вироблені в кожній партії будуть передані в кілька референсних лабораторій і їхня оцінка буде завершена після отримання цими лабораторіями надійних результатів. Для кожної партії встановлюється діапазон контролю якості для кожного параметра і кожного методу контролю параметрів. Діапазон контролю якості дорівнює присвоєному середньому значенню $\pm 3SD$. Це дозволяє отримати надзвичайно достовірні значення, які можуть бути використані лабораторіями для забезпечення достовірності своїх методів.

Аналіт	Одиниця	Діапазон Цільове значення	низький	високий
Цистатин С	мг / Л (mg/L)	На основі номера партії	На основі номера партії	На основі номера партії



ВИРОБНИК

Genrui Biotech Inc.
4-10F, Building 3
Geya Technology Park,
Guangming District, 518106
Shenzhen, China
Phone: + 86-755-26835560
Fax: + 86-755-26678789
e-mail: info@genrui-bio.com
Web: www.genrui-bio.com

ГЕНРУЙ БІОТЕК Інк.
4-10Ф, Будівля 3
Технологічний Парк Гея
Район Гуанмін, 518106
Шеньчжень, Китай
Тел.: + 86-755-26835560
Факс: + 86-755-26678789
e-пошта: info@genrui-bio.com
Веб: www.genrui-bio.com



УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ

ТОВ «ДІАМЕБ ТРЕЙД»
вул. Симона Петлюри, буд. 25
м. Івано-Франківськ, 76014, Україна
тел.: +380 (342) 775 122
e-пошта: info@diameb.ua
www.diameb.ua



2 °C - 30 °C