

БЕТА-2-МІКРОГЛОБУЛІН, КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ

β2-Microglobulin (β2-MG) Quality Control

Кат. №: 52105114

Дата випуску інструкції: 30-09-2024
Версія: А/0



ВИРОБНИК

Genrui Biotech Inc.
4-10F, Building 3
Geya Technology Park,
Guangming District, 518106
Shenzhen, China
Phone: + 86-755-26835560
Fax: + 86-755-26678789
e-mail: info@genrui-bio.com
Web: www.genrui-bio.com

ГЕНРУЙ БІОТЕК Інк.
4-10Ф, Будівля 3
Технологічний Парк Гея
Район Гуанмін, 518106
Шеньчжень, Китай
Тел.: + 86-755-26835560
Факс: + 86-755-26678789
е-пошта: info@genrui-bio.com
Веб: www.genrui-bio.com



Основою при проведенні аналізу є оригінал інструкції
англійською мовою, вкладеної в набір. Номер і дата версії
оригіналу та перекладу інструкції повинні співпадати.

НАЗВА ПРОДУКТУ

Загальна назва: Бета-2-мікроглобулін, Контроль якості.
Торгова назва: β2-MG КЯ.

СКЛАД НАБОРУ

Специфікація: 2 x 0.5 мл (mL) x флакон Кат. №: 52105114

ПРИЗНАЧЕННЯ

Для контролю якості Бета-2-мікроглобуліну на флуоресцентних
імунохроматографічних аналізаторах.

ОСНОВНІ КОМПОНЕНТИ

Рекомбінатний білок Бета-2-мікроглобуліну

ЗБЕРІГАННЯ І СТАБІЛЬНІСТЬ

НЕРОЗКРИТИЙ: КЯ стабільний протягом 24 місяців (див. етикетку щодо
конкретної дати) при температурі від -25 °C (°C) до 8 °C (°C),
ВІДКРИТИЙ: відновлений КЯ стабільний протягом 6 днів при температурі
-20 °C (°C) або 1 день при 2-8 °C (°C) у темному місці.
Примітка: уникати повторного заморожування/розморожування КЯ.

ПРОЦЕДУРА ТЕСТУВАННЯ

1. Перед використанням доведіть контроль якості до кімнатної
температури (18-30 °C (°C)).
2. Обережно відкрийте ковпачок пляшки, щоб уникнути
розпилювання вмісту.
3. Додайте 0.5 мл (mL) очищеної води.
4. Закрийте пляшку ковпачком та залиште її при кімнатній
темperaturі на 15 хвилин, обережно струсіть пляшку, щоб повністю
розчинити ліофілізат.
5. Після повного розчинення ліофілізату використати як зразок.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- 1) Тільки для діагностики *in vitro*, див. посібник з експлуатації.
- 2) Не використовувати реагенти після закінчення терміну придатності.
- 3) Компоненти різних партій не можуть бути взаємозамінними.

ЦІЛЬОВІ ЗНАЧЕННЯ

Продукти контролю якості вироблені в кожній партії будуть передані в кілька
референсних лабораторій і їхня оцінка буде завершена після отримання цими
лабораторіями надійних результатів. Для кожної партії встановлюється
діапазон контролю якості для кожного параметра і кожного методу контролю
параметрів. Діапазон контролю якості дорівнює присвоєному середньому
значенню $\pm 3SD$. Це дозволяє отримати надзвичайно достовірні значення, які
можуть бути використані лабораторіями для забезпечення достовірності
своїх методів.

Аналіт	Одиниця	Діапазон Цільове значення	низький	високий
Бета-2- мікроглобулін	мг / мл (mg/mL)	На основі номера партії	На основі номера партії	На основі номера партії



УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ

ТОВ «ДІАМЕБ ТРЕЙД»
вул. Симона Петлюри, буд. 25
м. Івано-Франківськ, 76014, Україна
тел.: +380 (342) 775 122
е-пошта: info@diameb.ua
www.diameb.ua



2 °C 30 °C