

РОЗЧИН 1

Solution 1

Кат. №: VA0000SL1

Дата випуску інструкції: 07-07-2025

Версія: B



Основою при проведенні аналізу є оригінал інструкції англійською мовою, вкладеної в набір. Номер і дата версії оригіналу та перекладу інструкції повинні співпадати.

Розчин 1

Гіпохлоритний очисний реагент для автоматичних аналізаторів.

Код продукту: VA000SL1 2x250 мл (мл)
VA0000SL-1 250 мл (мл)

Тільки для використання в *in vitro* діагностиці

ПРИЗНАЧЕННЯ

Розчин 1 містить стабілізований та мікрофільтрований гіпохлорит та детергенти для регулярного очищення та промивання зондів, кювет і пробірок клінічних біохімічних аналізаторів, що видаляють реагенти, зразки та білкові відкладення.

Розчин 1 сумісний лише з клінічними біохімічними аналізаторами Pictus. Для отримання додаткової інформації зверніться до посібника користувача приладу.

ІНГРЕДІЄНТИ

Гіпохлорит натрію < 2.0%
Поверхнево-активні речовини < 0.1%

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Розчин 1 містить гіпохлорит натрію у сильно лужному розчині.
- Усі зразки рідин організму слід вважати потенційно інфекційними матеріалами. Обробляйте всю кров та інші потенційно інфекційні матеріали з дотриманням відповідних запобіжних заходів. Використовуйте рукавички, маски та халати, якщо передбачається контакт з кров'ю.
- Будь ласка, зверніться до MSDS, пов'язаного з реагентом.
- Дотримуйтесь належної лабораторної практики (GLP) під час поводження з реагентами.

ПІДГОТОВКА РЕАГЕНТІВ

- Цей реагент готовий до використання і може бути застосований безпосередньо з контейнера; не потребує спеціальної підготовки реагентів.
- Щоб використовувати Розчин 1 для інтенсивного очищення кювет, розбавте Розчин 1 шестикратно (наприклад, додайте 5 мл (мл) Розчину 1 до 25 мл (мл) деіонізованої води типу 2*).
- Після розведення залиште реагент Розчину 1 при кімнатній температурі на 10-20 хвилин.

ЗАМІНА РЕАГЕНТУ

- Особа, що встановлює реагент, повинна бути навченим лабораторним працівником.
- Уникати забруднення пилом або мікробного забруднення пробірок і реагентів. Не зливати і не змішувати залишки реагенту з одного контейнера в інший.

ЗБЕРІГАННЯ, СТАБІЛЬНІСТЬ І УТИЛІЗАЦІЯ РЕАГЕНТУ

- Зберігати Розчин 1 при температурі від +4 °C (°C) до 32 °C (°C).
- Термін придатності Розчину 1 становить 18 місяців з дати виготовлення, при зберіганні в заданому температурному діапазоні.
- Не використовувати реагент після закінчення терміну придатності, зазначеного на етикетці контейнера.
- Стабільність у процесі експлуатації Розчину 1 у флаконі зберігається до кінця терміну придатності.
- У розведеному вигляді (наприклад, 5 мл (мл) Розчину 1 розведеного в 25 мл (мл) деіонізованої води Типу 2*) стабільність у процесі експлуатації становить 7 днів.
- Замініть розчини, коли настане термін виконання завдання з технічного обслуговування «Заміна розчинів».
- Не використовувати реагент після заморожування.
- Утилізувати відходи, невикористаний продукт і забруднені упаковки відповідно до місцевих правил утилізації.

У разі будь-яких проблем зверніться до місцевого офіційного дистриб'ютора Diatron для усунення несправностей.

Визначення та пояснення символів

На маркуванні цього виробу використовуються наступні символи. Символи відповідають стандарту ISO 15223-1 «Медичні вироби – Символи, що використовуються разом з інформацією, що надається виробником».

Для більшої зрозумілості їхні визначення наведено нижче:

Символ	Визначення
	Вказує на каталоговий номер виробника, за яким можна ідентифікувати медичний виріб
	Вказує на код партії виробника, за яким можна ідентифікувати партію або серію
	Вказує на дату, після якої медичний виріб не можна використовувати
	Вказує на температури, в межах яких медичний виріб можна безпечно використовувати
	Вказує на виробника медичного виробу
	Вказує на медичний виріб, який призначений для використання як медичний виріб для діагностики <i>in vitro</i>
	Вказує на необхідність ознайомлення користувача з інструкцією з використання
	Вказує на носій, який містить унікальну інформацію про ідентифікатор
	Вказує на відповідність застосовним вимогам Регламенту (ЄС) 2017/746 щодо медичних виробів для діагностики <i>in vitro</i> (IVDR)

На етикетці VA0000SL-1 (Гіпохлоритний очисний розчин) наведені нижче піктограма, сигнальне слово, а також твердження про безпеку та застереження відповідно до Регламенту (ЄС) № 1272/2008 (CLP):

Символ і сигнальне слово	Визначення
	GHS05: Корозія
Небезпека	«Небезпека» означає сигнальне слово, що вказує на більш суворі категорії небезпеки.



НЕБЕЗПЕКА

H314, H412, P260, P280,
P301+P330+P331,
P303+P361+P353,
P305+P351+P338, P310

H314 Викликає серйозні опіки шкіри і пошкодження очей.

H412 Шкідливий для водних організмів з довготривалими наслідками.

P260 Не вдихати вологу/пар.

P280 Використовувати захисні рукавиці/одяг/захист органів зору / обличчя.

P301+P330+P331 ПРИ КОВТАННІ: Прополоскати рот. Не викликати блювоту.

P303+P361+P353 У РАЗІ ПОТРАПЛЯННЯ НА ШКІРУ (чи волосся): негайно зняти весь забруднений одяг. Промити шкіру водою (або під душем).

P305+P351+P338 У РАЗІ ПОТРАПЛЯННЯ В ОЧІ: Обережно промити водою протягом декількох хвилин. Зняти контактні лінзи, якщо вони наявні і це легко зробити. Продовжувати промивання.

P310 Негайно зателефонувати до ЦЕНТРУ ОТРУЄНЬ або лікаря.



ВИРОБНИК

ДІАТРОН МІ ПЛс.
H-1097 м. Будапешт,
вул. Таблас, 39
Угорщина

Тел.: +36 14369800

Факс: +36 14369809

www.Diatron.com

DIATRON MI Plc.
H-1097 Budapest,
Táblás street, No. 39,
Hungary

Phone: +36 14369800

Fax: +36 14369809

www.Diatron.com



УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК

ТОВ «Діамеб трейд»
вул. Симона Петлюри, буд. 25
м. Івано-Франківськ, 76014, Україна
тел.: +380 (342) 77 51 22
e-mail: info@diameb.ua
www.diameb.ua

