

## РОЗЧИН 2

### Solution 2

Кат. №: **VA0000SL2**

Дата випуску інструкції: **07-07-2025**

Версія: **B**



Основою при проведенні аналізу є оригінал інструкції англійською мовою, вкладеної в набір. Номер і дата версії оригіналу та перекладу інструкції повинні співпадати.

#### Розчин 2

Промивний розчин для автоматичних аналізаторів.

Код продукту: VA0000SL2 2x250 мл (ml)  
VA0000SL-2 250 мл (ml)

Тільки для використання в *in vitro* діагностиці

#### ПРИЗНАЧЕННЯ

Розчин 2 містить детергенти для регулярного очищення та промивання зондів, кювет і пробірок клінічних біохімічних аналізаторів, що видаляють реагенти, зразки та білкові відкладення.

Розчин 2 сумісний лише з клінічними біохімічними аналізаторами Pictus. Для отримання додаткової інформації зверніться до посібника користувача приладу.

#### ІНГРЕДІЄНТИ

Поверхнево-активні речовини < 0.5%  
Стабілізатори < 0.2%  
Консерванти < 0.2%

#### ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Усі зразки рідин організму слід вважати потенційно інфекційними матеріалами. Обробляйте всю кров та інші потенційно інфекційні матеріали з дотриманням відповідних запобіжних заходів. Використовуйте рукавички, маски та халати, якщо передбачається контакт з кров'ю.
- Будь ласка, зверніться до MSDS, пов'язаного з реагентом.
- Дотримуйтесь належної лабораторної практики (GLP) під час поводження з реагентами.

#### ПІДГОТОВКА РЕАГЕНТА

- Цей реагент готовий до використання і може бути застосований безпосередньо з контейнера; не потребує спеціальної підготовки реагентів.

#### ЗАМІНА РЕАГЕНТУ

- Особа, що встановлює реагент, повинна бути навченим лабораторним працівником.
- Уникати забруднення пилом або мікробного забруднення пробірок і реагентів. Не зливати і не змішувати залишки реагенту з одного контейнера в інший.

#### ЗБЕРІГАННЯ, СТАБІЛЬНІСТЬ І УТИЛІЗАЦІЯ РЕАГЕНТУ

- Зберігати Розчин 2 при температурі від +4 °C (°C) до 32 °C (°C).
- Термін придатності Розчину 2 становить 24 місяці з дати виготовлення, при зберіганні в заданому температурному діапазоні.
- Не використовувати реагент після закінчення терміну придатності, зазначеного на етикетці контейнера.
- Стабільність у процесі експлуатації Розчину 2 у флаконі зберігається до кінця терміну придатності.
- Не використовувати реагент після заморожування.
- Утилізувати відходи, невикористаний продукт і забруднені упаковки відповідно до місцевих правил утилізації.

У разі будь-яких проблем зверніться до місцевого офіційного дистриб'ютора Diatron для усунення несправностей.

#### Визначення та пояснення символів

На маркуванні цього виробу використовуються наступні символи. Символи відповідають стандарту ISO 15223-1 «Медичні вироби – Символи, що використовуються разом з інформацією, що надається виробником».

Для більшої зрозумілості їхні визначення наведено нижче:

| Символ | Визначення                                                                                                                        |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | Вказує на каталоговий номер виробника, за яким можна ідентифікувати медичний виріб                                                |
|        | Вказує на код партії виробника, за яким можна ідентифікувати партію або серію                                                     |
|        | Вказує на дату, після якої медичний виріб не можна використовувати                                                                |
|        | Вказує на температури, в межах яких медичний виріб можна безпечно використовувати                                                 |
|        | Вказує на виробника медичного виробу                                                                                              |
|        | Вказує на медичний виріб, який призначений для використання як медичний виріб для діагностики <i>in vitro</i>                     |
|        | Вказує на необхідність ознайомлення користувача з інструкцією з використання                                                      |
|        | Вказує на носій, який містить унікальну інформацію про ідентифікатор                                                              |
|        | Вказує на відповідність застосовним вимогам Регламенту (ЄС) 2017/746 щодо медичних виробів для діагностики <i>in vitro</i> (IVDR) |

На етикетці VA0000SL-2 (Промивний розчин) наведені наступні вказівки щодо безпеки та застереження відповідно до Регламенту (ЄС) № 1272/2008 (CLP):

**EUH208, EUH210**

EUH208 Містить 5-хлор-2-метил-1,2Н-тіазол-3-он-3(2Н)-он.

Може викликати алергічну реакцію.

EUH210 Паспорт безпеки засобу надається за запитом.



#### ВИРОБНИК

ДІАТРОН МІ Плс.  
H-1097 м. Будапешт,  
вул. Таблас, 39  
Угорщина  
Тел.: +36 14369800  
Факс: +36 14369809  
[www.Diatron.com](http://www.Diatron.com)

DIATRON MI Plc.  
H-1097 Budapest,  
Táblás street, No. 39,  
Hungary  
Phone: +36 14369800  
Fax: +36 14369809  
[www.Diatron.com](http://www.Diatron.com)



#### УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК

ТОВ «Діамеб трейд»  
вул. Симона Петлюри, буд. 25  
м. Івано-Франківськ, 76014, Україна  
тел.: +380 (342) 77 51 22  
e-mail: [info@diameb.ua](mailto:info@diameb.ua)  
[www.diameb.ua](http://www.diameb.ua)

