

Розчини для перевірки системи

System Verification Solutions

Кат. №: VA000SVS

Дата випуску інструкції: 07-07-2025

Версія: B



Основою при проведенні аналізу є оригінал інструкції англійською мовою, вкладеної в набір. Номер і дата версії оригіналу та перекладу інструкції повинні співпадати.

Розчини для перевірки системи

Розчини для перевірки системи для клінічних біохімічних аналізаторів.

Код продукту:	VA000SVS	4x50 мл (мл)
	VA0000SL-4	50 мл (мл)
	ACE-B	50 мл (мл)
	VER-2	50 мл (мл)
	VER-3	50 мл (мл)

Тільки для лабораторного використання

ПРИЗНАЧЕННЯ

Розчини для перевірки системи - це набір розчинів для попередньо запрограмованих тестів на продуктивність системи аналізаторів лінійки Pictus. Набір містить водний розчин нітриту натрію для тестів на розсіяне світло та набір розчинів для перевірки системи (розчини для перевірки VER-1, VER-2 та VER-3) для тестування стабільності фотометра, тестування лінійності розчинника, тестування лінійності фотометра та тестування перешкод фотометра.

Для отримання додаткової інформації зверніться до посібника користувача приладу.

РЕАГЕНТИ

ACE-B - Ацетатний буфер використовується для 50-кратного розведення для приготування розчину для перевірки VER-1, який використовується для перевірки абсорбції спектрофотометра з максимальною абсорбцією УФ при 352 нм (nm). Готовий до використання.

Розчин для перевірки VER-2 / Розчин для перевірки UV/VIS для перевірки абсорбції спектрофотометра з максимальною абсорбцією УФ при 352 нм (nm). Готовий до використання.

Розчин для перевірки VER-3 / Розчин для перевірки UV/VIS для перевірки абсорбції спектрофотометра з максимальною абсорбцією УФ при 352 нм (nm). Готовий до використання.

Водний розчин **нітриту натрію** для тестів на розсіяне світло. Готовий до використання.

ІНГРЕДІЄНТИ

Розчин ацетатного буферу:	50 мл (мл)
Розчин для перевірки VER-2:	50 мл (мл)
Розчин для перевірки VER-3	50 мл (мл)
Розчин нітриту натрію для тесту на розсіяне світло:	50 мл (мл)

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Усі зразки рідин організму слід вважати потенційно інфекційними матеріалами. Обробляйте всю кров та інші потенційно інфекційні матеріали з дотриманням відповідних запобіжних заходів. Використовуйте рукавички, маски та халати, якщо передбачається контакт з кров'ю.
- Будь ласка, зверніться до MSDS, пов'язаного з реагентом.
- Дотримуйтесь належної лабораторної практики (GLP) під час поводження з реагентами.

ПІДГОТОВКА РЕАГЕНТІВ

- Розчини нітриту натрію, VER-2 і VER-3 готові до використання і можуть бути застосовані безпосередньо з контейнера; не потребують спеціальної підготовки реагентів.
- ACE-B - ацетатний буфер призначений для 50-кратного розведення розчину для перевірки VER-3 (наприклад, 4.9 мл (mL) ацетатного буферу ACE-B + 100 мкл (μL) розчину для**

перевірки VER-3) для приготування розчину для перевірки VER-1.

ЗАМІНА РЕАГЕНТУ

- Особа, що встановлює реагент, повинна бути навченим лабораторним працівником.
- Уникати забруднення пилом або мікробного забруднення пробірок і реагентів. Не зливати і не змішувати залишки реагенту з одного контейнера в інший.

ЗБЕРІГАННЯ, СТАБІЛЬНІСТЬ І УТИЛІЗАЦІЯ РЕАГЕНТУ

- Зберігати Розчини для перевірки системи при температурі від +4 °C (°C) до 32 °C (°C).
- Зберігайте в закритому флаконі, коли вони не використовуються, оскільки це летючі хімічні речовини. Функціональність речовин змінюється після короткого випаровування.
- Термін придатності Розчинів для перевірки системи (ACE-B, VER-2, VER-3, VA0000SL-4) становить 12 місяців з дати виготовлення, при зберіганні в заданому температурному діапазоні.
- Термін придатності Розчинів (ACE-B, VER-2, VER-3) становить 60 днів з дня відкриття, при зберіганні в заданому температурному діапазоні.
- Термін придатності приготованого розчину для перевірки VER-1 становить 60 днів, при зберіганні в заданому температурному діапазоні.
- Стабільність у процесі експлуатації Розчину нітриту натрію для тесту на розсіяне світло (VA0000SL-4) у флаконі зберігається до кінця терміну придатності.
- Не використовувати реагент після закінчення терміну придатності, зазначеного на етикетці контейнера.
- Не використовувати реагент після заморожування.
- Утилізувати відходи, невикористаний продукт і забруднені упаковки відповідно до місцевих правил утилізації.

У разі будь-яких проблем зверніться до місцевого офіційного дистриб'ютора Diatron для усунення несправностей.

Визначення та пояснення символів

На маркуванні цього виробу використовуються наступні символи. Символи відповідають стандарту ISO 15223-1 «Медичні вироби – Символи, що використовуються разом з інформацією, що надається виробником».

Для більшої зрозумілості їхні визначення наведено нижче:

Символ	Визначення
	Вказує на каталоговий номер виробника, за яким можна ідентифікувати медичний виріб
	Вказує на код партії виробника, за яким можна ідентифікувати партію або серію
	Вказує на дату, після якої медичний виріб не можна використовувати
	Вказує на температури, в межах яких медичний виріб можна безпечно використовувати
	Вказує на виробника медичного виробу
	Вказує на необхідність ознайомлення користувача з інструкцією з використання

На етикетці VA0000SL-4 (Розчин нітриту натрію для тесту на розсіяне світло) наведені нижче піктограма, сигнальне слово, а також твердження про безпеку та застереження відповідно до Регламенту (ЄС) № 1272/2008 (CLP):

Символ і сигнальне слово	Визначення
	GHS07: Знак оклику
Попередження	«Попередження» означає сигнальне слово, що вказує на менш суворі категорії небезпеки.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

H302 Шкідливий при ковтанні.

P264 Після роботи ретельно вимийте руки з милом і водою.

На етикетках ACE-B (Розчин ацетатного буферу), VER-2 (Розчин для перевірки VER-2), VER-3 (Розчин для перевірки VER-3) нанесені наступні вказівки щодо безпеки та застереження відповідно до Регламенту (ЄС) № 1272/2008 (CLP):

EUN208, EUN210

EUN208 Містить реакційну масу 5-хлор-2-метил-2Н-ізотіазол-3-ону та 2-метил-2Н-ізотіазол-3-ону (3:1). Може викликати алергічну реакцію.

EUN210 Паспорт безпеки засобу надається за запитом.



ВИРОБНИК

ДІАТРОН МІ Плс.
H-1097 м. Будапешт,
вул. Таблас, 39
Угорщина

Тел.: +36 14369800
Факс: +36 14369809

www.Diatron.com

DIATRON MI Plc.
H-1097 Budapest,
Táblás street, No. 39,
Hungary

Phone: +36 14369800
Fax: +36 14369809

www.Diatron.com



УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК

ТОВ «Діамеб трейд»
вул. Симона Петлюри, буд. 25
м. Івано-Франківськ, 76014, Україна
тел.: +380 (342) 77 51 22
e-mail: info@diameb.ua
www.diameb.ua

