

ОЧИЩУЮЧИЙ РЕАГЕНТ

Dia-Rinse-D

Кат. №: **h31103**

Дата випуску інструкції: **06-08-2013**

Версія: **1**



Основною при проведенні аналізу є оригінал інструкції англійською мовою, вкладеної в набір. Номер і дата версії оригіналу та перекладу інструкції повинні співпадати.

Кат. №: **h31103**

20 л кубічний контейнер

Кат. №: **h31113**

5 л кубічний контейнер

НАЗВА ПРОДУКТУ

Dia-Rinse-D

ПРИЗНАЧЕННЯ

(Тільки для використання в діагностиці In Vitro)

Dia-Rinse-D використовується для миття гематологічних аналізаторів DIAGON D-Cell 60, Mindray BC 2800, 3000, 3000plus, 3200 у проміжках між вимірюваннями при проведенні щоденного обслуговування та промивання.

КОРОТКИЙ ОПИС ТА ПРИНЦИП РОБОТИ

Dia-Rinse-D – це очищаючий реагент, який ефективно вимиває клітинний детрит, білки та тригліцериди шляхом детергентного розчинення.

АКТИВНІ ІНГРЕДІЄНТИ

Неорганічна сіль	< 2,1 %
Органічний буфер	< 1,1 %
Детергент	< 1,0 %
Стабілізатор	< 0,01 %



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Цей продукт не містить шкідливих компонентів і не є небезпечним. У разі попадання на шкіру чи в очі промити водою.
- З усіма зразками та матеріалами, з якими контактує слід поводитись так, ніби вони здатні передавати інфекцію, та утилізувати з відповідними запобіжними заходами.
- Не використовуйте реагент після закінчення терміну придатності, вказаного на етикетці!
- Уникайте мікробного забруднення реагентів, тому що це може призвести до помилкових результатів.
- Дотримуйтеся належної лабораторної практики (GLP) при роботі з цими реагентами.



ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

- Особа, яка встановлює реагент, повинна бути навченим лабораторним фахівцем.
- Залишіть реагент при кімнатній температурі принаймні на 24 години.
- Відкрутіть та зніміть кришку на кубічному контейнері / пляшці з реагентом. Приєднайте аспіраційну установку до кубічного контейнера/ пляшки. Закрутіть ковпачок.
- Подібним чином підключіть інші реагенти до приладу (див. нижче «НЕОБХІДНІ МАТЕРІАЛИ, ЯКІ НЕ НАДАЮТЬСЯ»).
- Ретельно праймувати реактиви через прилад, щоб вимити сторонні реагенти, сліди яких можуть спричинити помилкові результати. Для отримання додаткової інформації див. Посібник користувача.
- Повторно відкалібруйте прилад за допомогою КАЛІБРАТОРА або КОНТРОЛЬНОЇ КРОВІ, як зазначено у Посібнику з експлуатації.



ЗБЕРІГАННЯ І СТАБІЛЬНІСТЬ

Закритий реагент зберігає стабільність 18 місяців з дати виготовлення за умови зберігання при температурі 15–35°C у темному місці. Термін

придатності див. на етикетці упаковки. Реагент, який має будь-які ознаки забруднення або нестабільності, що відображається мутністю або зміною кольору, слід замінити. НЕ використовуйте реагент після заморожування. Після встановлення на прилад реагент стабільний протягом 60 днів.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

При щоденному використанні, реагент ефективно очищатиме трубопроводи та резервуари для рідини в приладі, зберігаючи фонові та переносні значення в межах специфікації приладу.

ОБМЕЖЕННЯ

Реагент слід використовувати в діапазоні температур навколишнього середовища від 15 до 35° С. Використання реагенту не замінює належну роботу та обслуговування приладу.

Реагенти Diagon можна використовувати лише з іншими реагентами Diagon. Помилкові результати можуть бути отримані, якщо реагент змішати із сторонніми реагентами.

НЕОБХІДНІ МАТЕРІАЛИ, ЯКІ НЕ НАДАЮТЬСЯ

Лічильник клітин (DIAGON D-Cell 60, Mindray BC 2800, 3000, 3000 plus, 3200)

Dia-Diluent-D

Кат. №: h31101 20 л

Кат. №: h31111 5 л

Dia-Lyse-Diff-D-CF

Кат. №: h31102 0,5 л

Dia-EZ-Cleaner-D

Кат. №: h31104 0,1 л

Ка. №: h31114 0,05 л

Dia-Probe-Cleaner-D

Кат. №: h31105 0,05 л

Кат. №: h31115 0,02 л

ВИМОГИ ДО ЗРАЗКІВ

Dia-Rinse-D призначений для використання зі зразками крові, зібраних шляхом веніпункції в ЕДТА антикоагулянті. Зразки для гематологічного аналізу можна зберігати до 8 годин при температурі від 16 до 30° С або до 24 годин після забору в холодильнику (2-8°С).

ВИРОБНИК



ДІАГОН LTD.
вул. Баросс, 48-52,
1047 Будапешт, Угорщина
Тел.: +36 1 3696500
Факс: + 361 3696301
Web: www.diagon.com
E-mail: diagon@diagon.com



УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК

ТОВ «Діамеб»
вул. Чорновола, 97
м. Івано-Франківськ, 76005
тел.: +38 (0342) 775 122
факс: +38 (0342) 775 123
e-mail: info@diameb.ua
www.diameb.ua

